

DTA YP-90



طرز کار استفاده از دستگاه:

1. کلید **Power** (کنار دستگاه) را مشخص کنید.
2. در این مدل امکان تنظیم پارامتر دمای محفظه وجود دارد.
3. برای تنظیم دمای محفظه ابتدا علامت کلید را فشار دهید. سپس با فشار دادن کلید $\approx$ نمایشگر دستگاه به حالت چشمک‌زن درمی‌آید. با استفاده از کلیدهای $\uparrow$ و $\downarrow$ دمای مورد نظر را تنظیم و دوباره علامت کلید را فشار دهید.
4. در صورت نیاز نداشتن به دستگاه با استفاده از کلید **Power** دستگاه را خاموش کنید.

پیام‌های خطای دستگاه

علت آلارم	روشن نشدن LED
سیستم تغذیه یا فیوزهای دستگاه دچار مشکل شده است	POWER
مشکل فن یا بالا رفتن غیرعادی دمای اطراف فن	FAN
از جای خود AIR یا SKIN یکی از دو سنسور خارج شده یا آسیب دیده است	SENSOR
دمای محفظه بالاتر از ۳۸ درجه است	OVERHEAT
وجود اختلاف بین دمای واقعی و دمای تنظیم شده به دلیل عوامل محیطی یا خرابی دستگاه	DEVIATION
با واحد فنی شرکت تماس بگیرید	SYSTEM

آلارم‌های صوتی توسط کلید مربوطه غیرفعال می‌شوند. چراغ‌های مربوط به آلارم در صورت برطرف شدن مشکل خاموش می‌شود. در صورت برطرف نشدن مشکل، پس از 5 دقیقه مجدداً آلارم صوتی فعال می‌شود.

نکات ایمنی:

- 1- دستگاه را در محل مناسب قرار دهید. از قرار دادن دستگاه در مجاورت دستگاه‌های حرارتی و برودتی، محل‌های پر سروصدا، پنجره و نور مستقیم آفتاب خودداری نمایید.
- 2- حداقل 10 دقیقه قبل از قرار دادن نوزاد در دستگاه، دستگاه را روشن کنید، تا دستگاه به شرایط ثبات حرارتی برسد و دقیقاً همان دمای مورد نظر شمارار تامین نماید.
- 3- در صورت استفاده از رطوبت، باید از آب مقطر استفاده نمود، و بعد از هر بار استفاده، محفظه شستشو و آب آن تامین شود.

روش‌های تمیز / ضدعفونی کردن دستگاه:

- 1- هنگام تمیز کردن دستگاه را خاموش کرده و سیم برق را از پریز جدا کنید.
- 2- پس از پایان کار با دستگاه پروپ را کاملاً تمیز پاک کرده و در جای خود قرار میدهیم.
- 3- برای تمیز کردن کناره‌های شیشه‌ای تخت احیا، از مواد الکلی دار استفاده ننمایید. برای این کار از سایر مواد ضدعفونی کننده، رقیق شده مانند هایتزن، دکونکس و ... استفاده ننمایید. برای نظافت قسمت‌های فلزی دستگاه محدودیتی وجود ندارد.