

فلومتر اکسیژن

روش کار با دستگاه:

۱. ابتدا از سالم و تمیز بودن فلومتر اطمینان کامل داشته باشید.
۲. فلومتر مورد نظر را از قسمت فلزی آن درآلت مخصوص خود با فشار دادن آن جایگذاری کنید.
۳. به وسیله مازول حرکتی، اکسیژن مورد نیاز آن را تنظیم کنید.

توجه:

- ❖ در زمان نشی از فلومتر و کنسول، از آن استفاده نکنید و با قسمت گازهای طبی بیمارستان تماس حاصل فرمایید.
- ❖ برای جلوگیری از انفجار، از باز کردن دستگاه با دستهای چرب و روغنی خودداری نمایید.
- ❖ پس از پایان کار نسبت به بسته شدن فلومتر اقدام کنید.



فلومتر اکسیژن

روش کار با دستگاه:

۴. ابتدا از سالم و تمیز بودن فلومتر اطمینان کامل داشته باشید.
۵. فلومتر مورد نظر را از قسمت فلزی آن درآلت مخصوص خود با فشار دادن آن جایگذاری کنید.
۶. به وسیله مازول حرکتی، اکسیژن مورد نیاز آن را تنظیم کنید.

توجه:

- ❖ در زمان نشستی از فلومتر و کنسول، از آن استفاده نکنید و با قسمت گازهای طبی بیمارستان تماس حاصل فرمایید.
- ❖ برای جلوگیری از انفجار، از باز کردن دستگاه با دستهای چرب و روغنی خودداری نمایید.
- ❖ پس از پایان کار نسبت به بسته شدن فلومتر اقدام کنید.

