

طرز استفاده از دستگاه



- سنسور را به کابل اتصال متصل کنید و سپس آنها را به کانکتور مربوطه روی دستگاه وصل نمایید.
- برای روشن نمودن دستگاه، کلید ON را فشار دهید.
- دستگاه بعد از نمایش لوگوی شرکت پارسیان طب و به صدا درآمدن آهنگ پیشواز روشن می شود.
- برای خاموش کردن دستگاه، کلید OFF را فشار دهید.
- کلید  جهت قطع موقت هشدارهای صوتی تعبیه شده است.
- برای ورود به منوها و تغییر تنظیمات دستگاه از کلید منوی تنظیمات  استفاده کنید.
- برای جابجایی در منو و کاهش مقادیر تنظیمات از کلیدهای منوی تنظیمات  و  استفاده کنید.
- در صورت اتصال سنسور دما به محل تعبیه شده روی دستگاه میزان آن روی صفحه بصورت اتوماتیک نمایش داده خواهد شد.
- با انتخاب آیکن  قادر به تنظیم نوع بیمار در حالات بزرگسال، کودک یا نوزاد و نیز حد بالا و پایین هشدارهای دستگاه مربوط به مقادیر **PULSE** و **SPO2** می باشید.
- با انتخاب آیکن  می توانید وارد منوی مربوط به ثبت اطلاعات بیمار در واحد زمان (**TREND**) شوید.
- از آیکن  جهت ورود به منوی تنظیمات استفاده کنید.
- در صورت اتصال سنسور دما به محل تعبیه شده روی دستگاه میزان آن روی صفحه بصورت اتوماتیک نمایش داده خواهد شد.
- برای قطع برق ورودی به دستگاه از کلید خاموش - روشن که در پشت دستگاه قرار دارد استفاده کنید.
- برای بررسی میزان شارژ باطری هنگامیکه دستگاه خاموش است کلید  را فشار دهید.
- هرگز از سنسورهای متفرقه جهت اتصال به سیستم استفاده نکنید.