

# تخت احیاء نوزاد

**SKIN TEMPERTURE:** درجه حرارت پوست بدن نوزاد را نشان می دهد.

**SKIN CONTROL:** زمانیکه از سنسور حرارتی برای کنترل درجه حرارت استفاده می شود، این چراغ روشن می شود.

**MANUAL:** زمانیکه کنترل درجه حرارت بدن نوزاد به صورت دستی کنترل می شود، این چراغ روشن می شود.

**S/M:** برای تغییر تنظیمات دستگاه از سیستم **SKINCONTROL** به **MANUAL** و بالعکس استفاده می شود.

↕↕ برای تنظیم میزان حرارت تولید شده توسط دستگاه استفاده می شود.

برای قطع آلامر دستگاه استفاده می شود.

**SKIN PROBE:** برای اتصال سنسور حرارتی به استفاده می شود.

□□ دو دکمه قرمز روی بدنه دستگاه برای تغییر ارتفاع تخت استفاده می شود.

## NIC - CONTROL UNIT



۱- نشان دهنده دما پوست بدن نوزاد

۲- جهت کاهش یا افزایش دما در حالت manual

۳- کلید انتخاب حالت کارکرد

(جهت انتخاب حالت کنترل دما توسط پروب پوستی و یا به صورت دستی)

۴- نشانگر وات خروجی ( جریان خروجی جهت روشن شدن رادیانت هیتر

به صورت درجه بندی روی بار گراف در حالت manual)

۵- جهت انجام امور کالیبراسیون

۶- قطعی پروب

۷- اختلاف دما بیشتر یا کمتر از ۱ درجه

۸- نبود جریان الکتریکی ۷+۲۲

۹- جهت قطع صدای بازر

۱۰- محل قرار گرفتن پروب پوستی نوزاد

۱۱- سلکتور تنظیم دما توسط user