


### راهنمای استفاده از پانل جلوی دستگاه

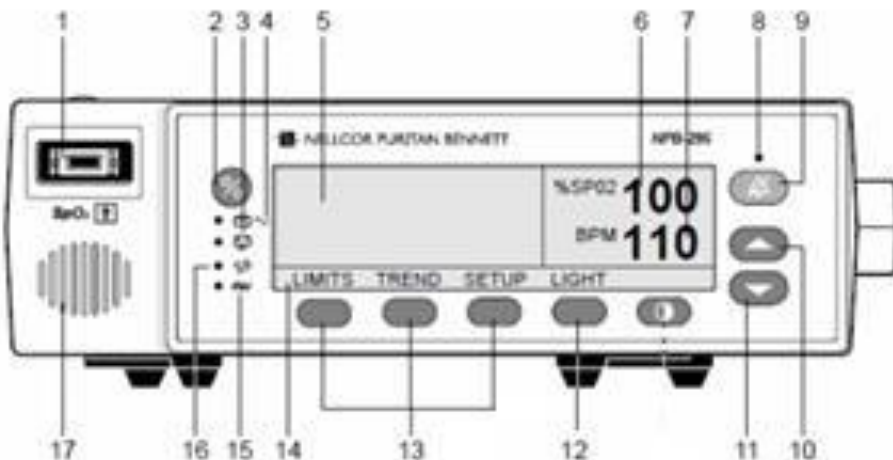

۱	پورت اتصال سنسور	۹	کلید بی صدا کردن آلارم
۲	کلید روشن / خاموش	۱۰	کلید بالا تنظیم
۳	نشانگر ضعیف بودن باتری	۱۱	کلید پایین تنظیم
۴	نشانگر اتصال برق شهری	۱۲	روشن / خاموش نور نمایشگر
۵	نمایشگر شکل موج	۱۳	کلیدهای کنترلر
۶	نشانگر درصد سچوریشن	۱۴	نوار منو
۷	نشانگر نرخ ضربان قلب	۱۵	نشانگر وجود حرکات
۸	نشانگر بی صدا بودن آلارم	۱۷	بلندگو

## روش کار با دستگاه:

- ۱- دستگاه را مجاور بیمار قرار دهید.
- ۲- کابل دستگاه را به برق شهری متصل کنید. (در صورت از بین رفتن باتری داخلی، دستگاه با برق شهری نیز کار نمی‌کند. (EEE4))
- ۳- پراب متناسب با بیمار را انتخاب کرده و به دستگاه متصل کنید.
- ۴- دستگاه را روشن کنید.
- ۵- پراب را به انگشت بیمار وصل کنید.
- ۶- می‌توانید سچوریشن و نرخ ضربان قلب بیمار را مشاهده کنید.
- ۷- در صورت مانیتور بیمار مطمئن شوید که حدود بالا و پایین آلارم **SPO2** و **HR** بطور صحیح تنظیم شده‌اند.

## عملکرد کلیدهای دستگاه

- برای تنظیم حدود بالا و پایین آلارم‌ها، از کلید **"LIMITS"** و سپس کلیدهای بالا و پایین استفاده کنید.
- برای تغییر نوع نمایش شکل موج به روش مقابل عمل کنید.

### **SETUP => VIEW => PLETH / BLIP**

- برای تنظیم شدت صدای ریتم قلب، **کلید تنظیم بالا ۱۰ یا پایین ۱۱** را نگاه‌دارید.
- برای مشاهده شدت صدای اخطار دستگاه، **کلید ۹** را نگاه‌دارید، سپس با کلید بالا و پایین، می‌توان آن را تنظیم کرد.
- برای روشن / خاموش کردن صفحه نمایش، از **کلید ۱۲** استفاده کنید. (در صورت ضعیف بودن باتری داخلی صفحه نمایش روشن نمی‌شود.)