

## خصوصیات کلیدها و عملکرد دستگاه

فشارسنج عقربه ای	کلید تنظیم مکش	شاسی run\set\off
		

## روش کار با دستگاه:

۱. ابتدا باید از تمیز بودن مخزن‌های دستگاه اطمینان حاصل نمود.
۲. سپس لوله‌های رابط را از نظر این که اتصالات کامل و بدون عیب باشد بررسی نموده و سرساکشن مناسب را به لوله رابط ساکشن وصل می‌کنیم با فشار دادن شاسی مشکی رنگ از حالت **off** به **run** دستگاه شروع به کار می‌کند و با چرخاندن کلید تنظیم فشار مکش دستگاه را تنظیم می‌کنیم.
۳. لازم به ذکر است جهت شستن لوله‌های رابط ساکشن از قبل ظرف حاوی سرم شست شو را آماده نموده و پس از پایان کار لوله‌های رابط و محفظه تخلیه ترشحات را شسته و ضدعفونی نموده و در محل خود قرار می‌دهیم.

## دستور العمل نگهداشت دستگاه‌های ساکشن:

لطفا جهت استفاده از ساکشن به موارد زیر توجه نمایید:

- از سوراخ نبودن شلنگ‌ها و یا عدم پارگی تیوپ‌ها اطمینان حاصل نموده و دقت شود درپوش‌ها و اتصالات دستگاه بر روی مخزن‌ها خوب نصب شوند.
- واشر درپوش‌های مخزن باید بعد از هر بار استفاده تمیز شوند و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کرد.
- بعد از استفاده از دستگاه حتما دستگاه و شلنگ‌های آن را با آب ولرم شسته و از داخل تیوپ‌ها آب ولرم رد شود.
- مخزن شیشه‌ای بعد از استفاده تخلیه و حتما با محلول ضدعفونی کننده خوب ضدعفونی شده و خشک گردند و در صورت عدم استفاده بیمار مخازن به هیچ عنوان حاوی محلول نباشند.
- قبل از جابجایی ساکشن از خوب فیکس بودن مخزن‌ها اطمینان حاصل نماییم.
- روزانه به طور مرتب دستگاه ساکشن از لحاظ سالم بودن و میزان مکش دستگاه روشن شده و چک شود.

### حداکثر فشار ساکشن:

بزرگسالان 111-150 mmhg

اطفال 96-110 mmhg

نوزادان 51-95 mmhg