

MEDITEC



روش استفاده از دستگاه:

- ۱- پیچ دستگاه را روی **MAN** گذاشته و با هندل میزان **Rate** را تنظیم می کنیم و فشار می دهیم.
- ۲- اگر فلش دستگاه روی **Auto** باشد، با پیچ قرمز ریه را مشخص می کنیم. از حجم کار شروع می کنیم. اگر دستگاه آلام زد، یعنی حجم داده شده اضافه است؛ آن را کمتر می کنیم.
- ۳- پیچ دستگاه را از روی **MAN** برداشته و با هندل میزان **Rate** را تنظیم می - کنیم و فشار می دهیم.