

Medap



طرز کار استفاده از دستگاه:

۱. ابتدا دوشاخه برق را به پریز متصل می‌نماییم.
۲. پس از وصل کردن لوله ساکشن و آماده بودن جهت ساکشن با کلید چرخشی روی دستگاه آن را روشن می‌نماییم.
۳. با رگولاتور (High / Vacuum) پیچ طوسی رنگ) روی دستگاه، مکش دستگاه را تنظیم می‌نماییم.
۴. بعد از اتمام استفاده دستگاه را خاموش کنید.

نکات ایمنی:

- ۱- پمپ‌های ساکشن به طور عمده از فلزات و پلاستیک‌هایی ساخته شده‌اند که قابل دفع بر طبق مقررات محلی است. موتورها و کندانسورها و باتری‌های قابل شارژ و غیره را به صورت جداگانه مطابق مقررات محلی دور بیندازید.
- ۲- از بکارگیری این دستگاه در مکان‌هایی که خطر انفجار وجود دارد خودداری کنید.

روش‌های تمیز / ضدعفونی کردن دستگاه:

قسمت‌های زیر باید به صورت متناوب تمیز شوند.

- ۱- سطح خارجی دستگاه:
برای تمیز کردن سطح خارجی پمپ، از پارچه مرطوب استفاده کنید و از بکارگیری پاک‌کننده‌ها و ضدعفونی‌کننده‌های غلیظ بپرهیزید.
- ۲- قطعات پلاستیکی:
شیشه‌های ساکشن و سرپوش‌هایی که مانع از لبریز شدن مواد داخل شیشه ساکشن می‌شوند و همچنین لوله‌های اتصال را می‌توانید برای مدت ۴ دقیقه در دمای ۱۳۴ درجه اتوکلاو کنید.
- ۳- لوله‌ها:
پمپ‌های ساکشن معمول مجهز به لوله‌های داخلی و خارجی از جنس سیلیکون هستند. این لوله‌ها را به جز لوله‌های مصرفی خاص، بعد از استفاده از دستگاه، ابتدا با آب شستشو داده، سپس ضدعفونی و بعد اتوکلاو کنید.
- ۴- شیشه‌های ساکشن در صورتی که از جنس پلی‌سولفون یا پلی‌کربنات ساخته شده باشند، می‌توانید به یکی از روش‌های زیر ضدعفونی کنید:

- اتوکلاو کردن در دمای 134 درجه دو مدت زمان ۴ دقیقه.
- جوشاندن (مدن ۵ دقیقه).
- استفاده از دستگاه شستشو و ضدعفونی کننده.
- توسط مواد شیمیایی.

از بکارگیری پاک‌کننده‌های دارای فنل برای نظافت شیشه‌ها خودداری کنید.

دقت کنید که بعد از هر بار شستشوی شستشوی شیشه‌های ساکشن، این شیشه‌ها به دقت تحت بازرسی چشمی قرار دهید تا آثار شکستگی در آنها نباشد.